

Boltpistol



Beskrivelse: Forkromet bolt pistol til 9 mm ammunition. Leveres i æske med tilhørende rensesæt.

Anvendelsesområder: Til bedøvelse af slagtedyr forud for aflivning/slagtning.

Sikkerhedsinstruktioner:

Læs brugsanvisningen før udstyret tages i brug.

Når bolt pistolen er ladet udvises ekstra opmærksomhed på hvad pistolen peger på. Der må ikke skydes ud i luften. Prøveskud skal ske på et tykt fast underlag.

Bolt pistolen skal opbevares utilgængeligt for børn.

Bolt pistolen må udelukkende anvendes til bedøvelse af slagtedyr.

Der må ikke foretages nogen ændringer på udstyret.


Der bør bæres høreværn.

Overhold altid gældende regler for bedøvelse/afblødning – er der tvivl, kontakt da dyrlæge.

Tekniske specifikationer:

Længde	33 cm
Diameter	40 mm
Vægt	2,25 kg
Ammunition	9 x 17 mm Patroner: Grøn: svin, kalve og får Gul: køer, heste Blå: okser Rød: større dyr
Max brug	17 skud / min.

Overblik over udstyret:

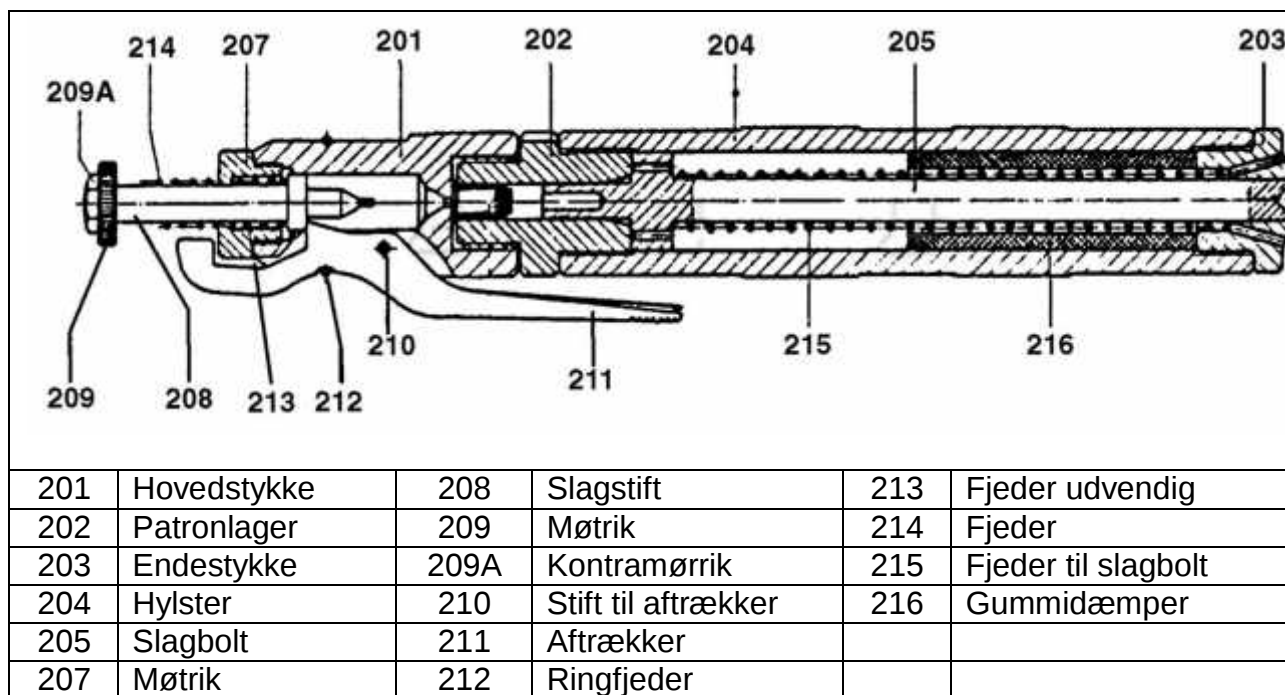


Brugsanvisning:

1. Boltpistolen lades ved at skrue hovedstykket (201) af.
2. Patronen lægges i patronlageret (202) med tændhætten opad.
3. Hovedstykket skrues fast igen.
4. Slagstiften (208) trækkes ud indtil aftrækkeren klikker ind (høres tydeligt).
5. Boltpistolen er nu ladet og klar til brug.
6. Boltpistolen holdes vinkelret på dyrets tinding¹. Affyres ved at aktivere aftrækkeren.

¹ Se tegningerne 1-6

Placering af indskud hos kvæg

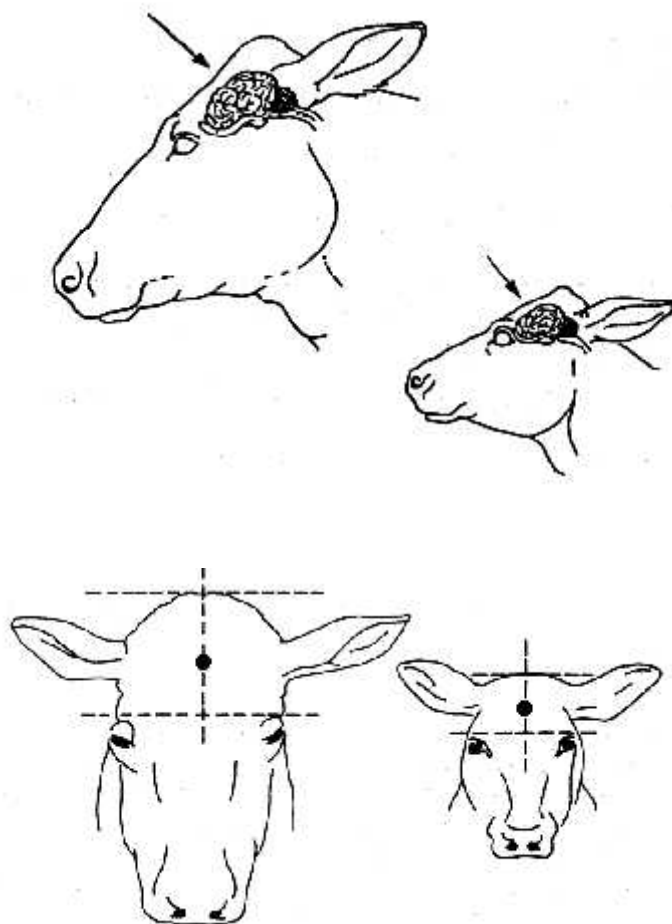


Hos kvæg skal indskuddet placeres i panden. Nakkeskud anses ikke for en korrekt placering for opnåelse af tilstrækkelig bedøvelse af kreaturer.

Kvæg (andre end tyre og kalve): Sigt på punktet halvvejs mellem toppen af hovedet og den imaginære linje over øjnene.

Tyre: Sigt på punktet halvvejs mellem toppen af hovedet og linjen over øjnene, og placer boltpistolen 1 cm ved siden af midterlinjen.

Kalve: Sigt en anelse lavere end for voksent kvæg, da den øvre del af kalvehjernen ofte er underudviklet.

Placering af indskud hos svin

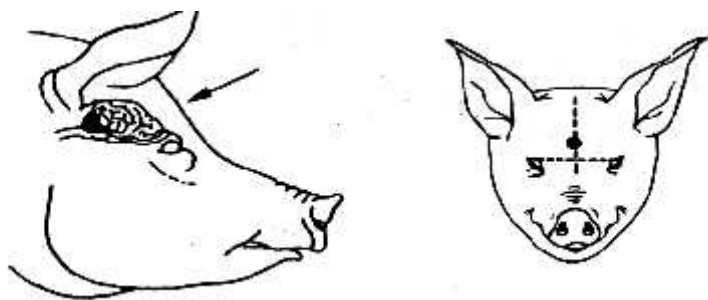

Orner og fuldvoksne søer kan være vanskelige at bedøve med boltpistol. Dels er sinus frontalis meget store og hjernen ligger dybt, og dels kan det være et problem at opnå tilstrækkelig kraft grundet de særlig kraftige pandeknøgler. Placer boltpistolen ca. 5 cm over øjnene og en anelse til siden for midtlinjen.

Svin (andre end orner og fuldvoksne søer): Placer boltpistolen i midtlinjen ca. 2,5 cm over øjnene.

Placering af indskud hos får

Hos hornede får må indskuddet placeres i nakken, hvis hornene forhindrer, at indskuddet placeres i panden. Placer boltpistolen lige bag linjen der går gennem hornene. Sigt i retning af munden.

Placering af indskud hos hornede får



Hos hornløse får placeres boltpistolen i midtlinjen på det højeste punkt på hovedet. Sigt i retning af kæbevinklen.

Placering af indskud hos hornløse får




Placering af indskud hos geder



Hos hornede geder må indskuddet placeres i nakken, hvis hornene forhindrer indskud i panden. Indskuddet skal i så fald placeres lige bagved linjen gennem hornene. Sigt i retning af munden.

Hos hornløse geder placeres boltpistolen på det højeste punkt af hovedet. Sigt i retning af kæbevinklen.

Placering af indskud hos heste

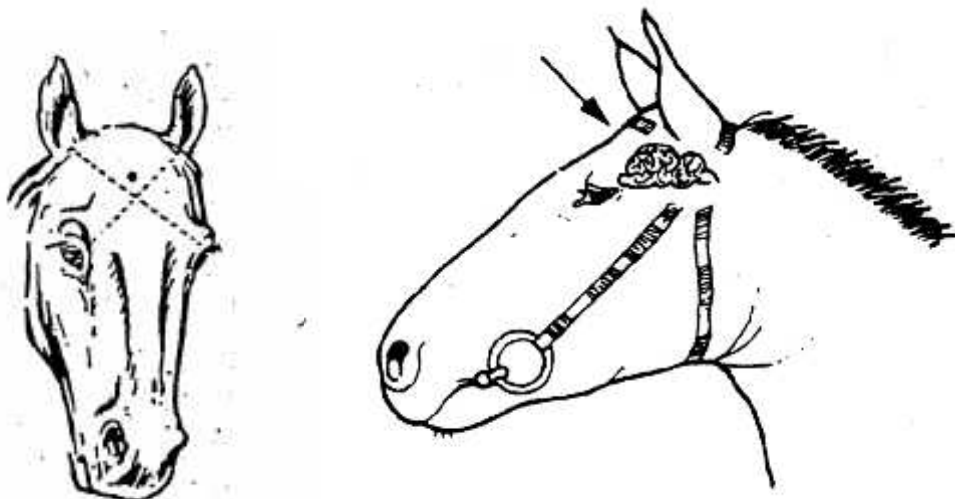

Heste: Placer boltpistolen vinkelret på frontalknoglen (pandebenet) lige over det punkt, hvor imaginære linjer fra øre til øje krydses.

Rengøring/vedligeholdelse:

Efter hvert skud skal patronlageret (202) renses med den lille medfølgende børste. Det anbefales derudover at boltpistolen renses og smøres dagligt efter brug.

Boltpistolen skilles ad, og rengøres med det medfølgende rensesæt.

Beskidte dele renses i petroleum eller dieselolie.

De rengjorte dele smøres med våbenolie, dog ikke gummidæmperen (216).

Test boltpistolen ved at sætte rensestokken i i stedet for en patron. Når rensestokken trykkes ned skal slagbolten komme ca. 75 mm ud af munden, og forsvinde helt igen når trykket aftager.

Til sidst samles boltpistolen igen.